



Masque facial à usage unique plissé 3 épaisseurs avec courroies d'oreilles

RMK217

Description

Ce masque facial jetable hypoallergénique offre une grande capacité de filtration et une excellente respirabilité pour protéger la bouche et le nez contre les particules en suspension dans l'air.

Le masque s'ajuste à tous les contours du visage offrant ainsi un excellent confort. Muni d'une pince nasale ajustable et de courroies d'oreilles.

*Ne contient pas de Graphene.

Certifications

EN14683:2019 Type IIR

Évalue l'efficacité du matériau filtrant dans le sens de l'expiration. Protège contre les particules de poussière non toxiques, les allergènes et réduisent la transmission d'agents infectieux.

ASTM F2100 Level 2

Adapté à des niveaux modérés d'exposition aux fluides (éclaboussures ou pulvérisation).

Approuvé FDA

Efficacité du filtre (BFE): $\leq 98\%$

(Efficacité de filtration) Pour une utilisation industrielle de ce type de masque, le BFE de plus de 98 % est recommandé avec nos autres certifications.

Tissu


- Masque facial jetable plissé 3 épaisseurs avec courroies d'oreilles

Taille:

- Universelle

Emballage

- 50/boîte
- 40 boîtes/caisse
- 25 caisses/palette

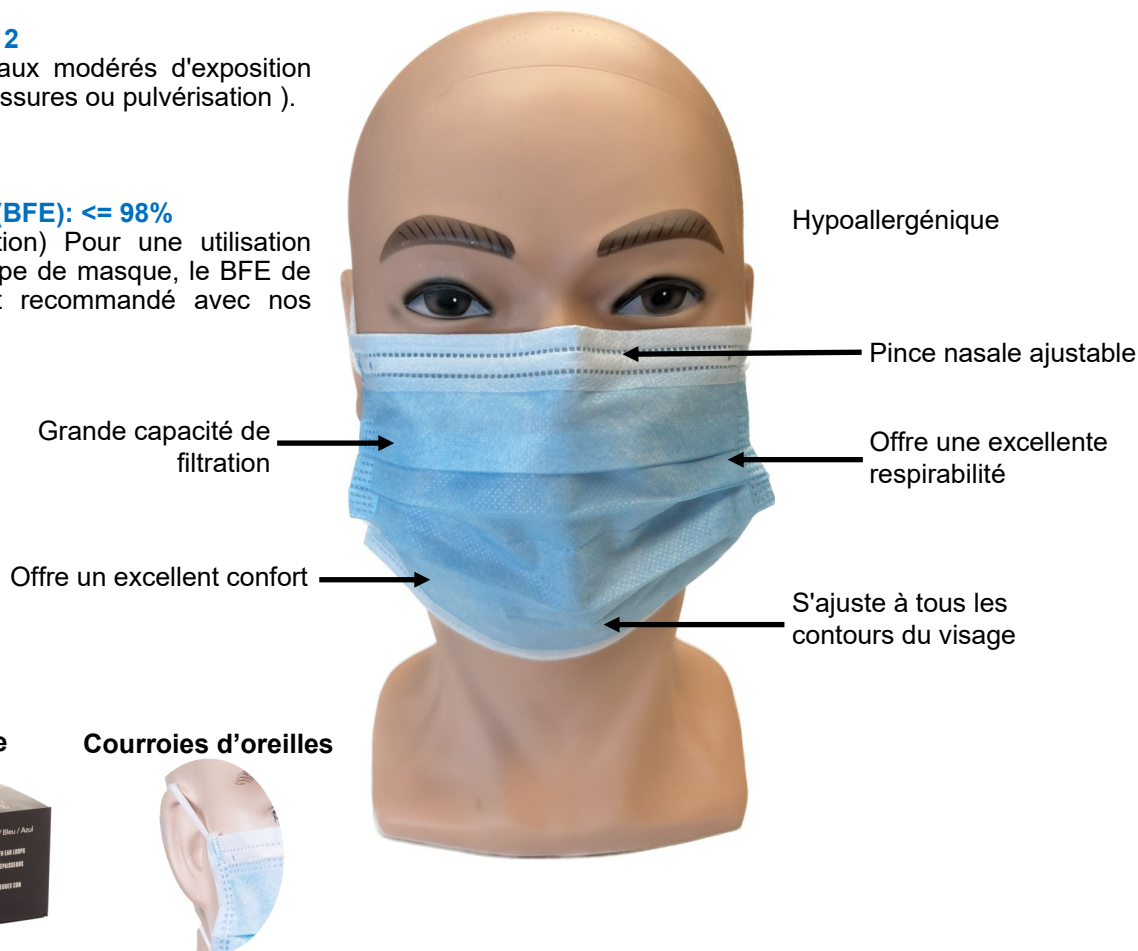

Boîte distributrice

Courroies d'oreilles



FICHE TECHNIQUE

Protection respiratoire



KOSTO
BUILT STRONG • BĂTI SOLIDE

Produits associés

Vêtements jetables
VCK360/VCK370/VCK320



Gants jetables
MKC104/MKC115/MKC107



Mode d'emploi:


LIMITES D'UTILISATION : Dispositif à usage unique. Utiliser 2 à 3 masques par jour par personne.
Le temps de port maximum conseillé est de 4 heures.

STOCKAGE : Les masques ont une durée de conservation limitée et doivent être stockés dans un endroit :

- À l'abri de la lumière
- À l'abri de l'humidité
- Bien ventilé
- Avec une température entre 10 et 25°C.
- La durée maximum suggérée pour l'entreposage des masques est de 5 ans.

AVERTISSEMENT : Il est essentiel que le masque soit enlevé en dernier, après tout autre matériel de protection (gants, vêtements, lunettes de protection) afin de limiter les risques de contamination. Les mains doivent être désinfectées après le retrait du masque.

Tableau des tailles

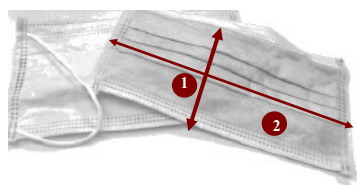

Taille Kosto *			Universelle
1	Largeur	cm	9.5
		po / in	3.7
2	Longueur	cm	17.5
		po / in	6.9